(de)







Neisser

I (1a) • II (1b) • III (2)

Produktinformation für die Neisser [1] Lösungen I (1a), II (1b) und III (2).

Prinzip

Darstellung von Diphteriebakterien durch mikrobiologische Färbung. Die Lösungen werden wie angegeben verwendet und sind bei Raumtemperatur haltbar bis zum aufgedrückten Verfallsdatum.

Reagenzien

Die Lösung ist gebrauchsfertig und bei Raumtemperatur haltbar bis zum aufgedruckten Verfallsdatum.

Gefahren und Sicherheit

Beachten Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen im Gebrauch von Laborreagenzien. Der Umgang sollte durch sachkundiges Personal erfolgen. Während der Arbeit Schutzkleidung und Einmalhandschuhe tragen.









Für weitere Sicherheitshinweise beachten Sie bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (SDB) Download über QR-Code oder Link:

www.sds-id.com/150021-4 www.sds-id.com/150022-3 www.sds-id.com/150023-2

Inhalt / Hauptbestandteile

1x 100ml Neisser I (1a) 003841-0100 003841-0500 1x 500ml Neisser I (1a) 003841-1025 1x 2.5 | Neisser | (1a)

Methylenblau < 0.5%; Ethanol 2.5 ... 10%;

Essigsäure 2.5 ... 10%; nichtreaktive Bestandteile.

003842-0100 1x 100ml Neisser II (1b) 003842-0500 1x 500ml Neisser II (1b) 1x 2.5 | Neisser II (1b) 003842-1025

Krystallviolett < 2.5%; Ethanol 2.5 ... 10%;

nichtreaktive Bestandteile. 003843-0100 1x 100ml Neisser III (2) 1x 500ml Neisser III (2) 003843-0500 003843-1025 1x 2.5 | Neisser III (2)

Chrysoidin Y < 2.5%; 'nichtreaktive Bestandteile

Zusätzlich (bei Bedarf)

004201-1010 * 1.0 I Salzsäure-Alkohol (zur Reinigung von Farbstoffen) *

* Ebenfalls erhältlich bei Biorapid GmbH

Reagenzvorbereitung

Neisser 1 (I + II):

Herstellung der Gebrauchslösung kurz vor Gebrauch durch Mischung von 2 Vol.-Teilen Neisser 1a und 1 Vol.-Teil Neisser 1b.

Neisser 2 (III):

Diese Lösung ist gebrauchsfertig.

Probenmaterial

Klinisch-zytologisches Material (Sputum, Eiter, Abstriche)

Referenzbereiche

.....negativ

Probenvorbereitung

Vom Probenmaterial werden luftgetrocknete, hitzefixierte Ausstriche

Durchführung

- 30 sec. Färben mit Neisser 1 (Methyleblau-Krystallviolett).
- Kurz mit Aqua dest abspülen.
- 60 sec. Gegenfärben mit Neisser 2 (III). 3.
- 4. Kurz mit Aqua dest abspülen.
- Präparat zwischen Filterpapier trocknen.

Auswertung

Polkörperchen werden dunkelbraun bis schwarz dargestellt, Bakterienkörper bräunlich.

Die Intensität der Färbung ist abhängig von der Vorbehandlung und der Beschaffenheit der Probe bzw. der Ausstrichpräparate. Eine Anpassung der Durchführung an die gegebenen Bedingungen kann erforderlich sein.

Andere Verfahren nach anderen Literaturstellen können ebenso mit diesen Reagenzien durchgeführt werden.

Support / Infoservice

Methodische und technische Unterstützung erhalten Sie per eMail unter support@biorapid.de. Darüber hinaus können Sie Anfragen auch telefonisch oder per Fax an uns richten.

Überprüfen Sie die Aktualität dieser Produktinformation regelmäßig auf unseren Internet-Seiten.

Entsorgung

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.

Gebrauchte und verfallene Lösungen sind entsprechend der lokalen Vorschriften zu entsorgen. Innerhalb der EU gelten die Vorschriften auf der Grundlage Richtlinie 67/548/EWG des Rates der Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe, in der jeweils gültigen Fassung.

Dekontaminierte Verpackungen können dem Hausmüll oder Recycling zugeführt werden, soweit nicht anders geregelt. Entsorgung

Fußnoten

[1] Neisser, Albert, deutscher Dermatologe, 1855 - 1916.



medical laboratory-diagnostics
biomedical reagents

analytic-chemical reagents

Waldmatten 13 ● D-79224 Umkirch/Freiburg ● Germany

+49 7665 9329431 Fon: Fax: +49 7665 9329433 eMail: office@biorapid.de Internet: www.biorapid.de